



1 ▶

Een paar BVD-oormerken bestaat uit:

- (1) een conventioneel oormerk;
- (2) een oormerk voor het nemen van het BVD-staal.

Het plastic buisje, de zogenaamde staalhouder, is voorzien van het oormerknummer.


Controleer goed of het nummer op de staalhouder overeenstemt met het nummer op de oormerken.



◀ 2

Het BVD-oormerk heeft twee flappen:

- (1) een mannelijke flap met een witte cilinder;
- (2) een vrouwelijke flap die voorzien is van een witte knop.

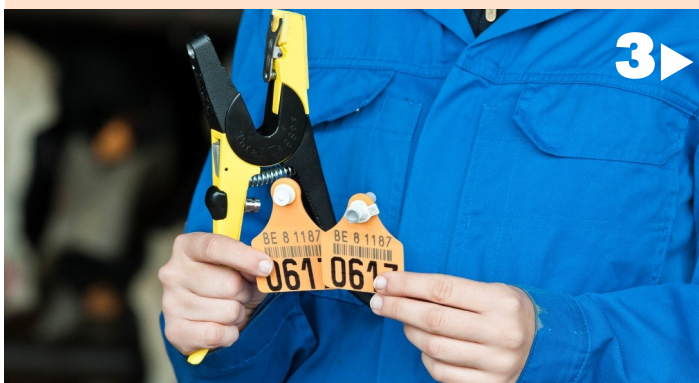

3 ▶


Neem de mannelijke oormerkflap. Druk aan de zijkant van de tang op het veertje en plaats de flap in de opening.

Neem vervolgens de vrouwelijke oormerkflap, druk de veer naar beneden en leg de flap in de tang. Let erop dat je het groene kunststof plaatje niet opent of beschadigt.



◀ 4

Plaats het oormerk, net als elk ander oormerk.

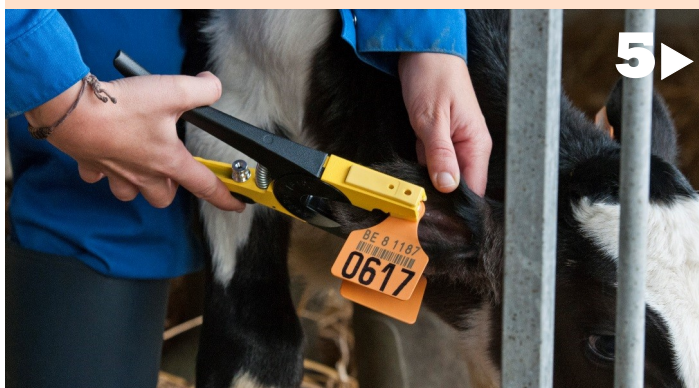

5 ▶



6▶

De metalen pin met het oorweefsel van het kalfje blijft op de tang zitten.

Controleer of er een groen stukje kunststof aan de bovenkant van de metalen pin zit.

Nu schuif je het plastic buisje over de pin en sluit je de tang.



7◀



8▶

Om de stahouder uit de tang te verwijderen, druk je op het veertje aan de zijkant van de tang.

Verpak het staal in het plastic zakje en stop het vervolgens in de envelop die u ontvangen hebt.



9◀



10▶

Stuur de envelop naar het labo via de post. U kan het staal kosteloos versturen door gebruik te maken van de BVD-antwoordcodestickers.

U kan de antwoordcodestickers steeds kosteloos verkrijgen bij elk erkend labo.



Heb je vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van DGZ:  
tel. 078 05 05 23 of e-mail [helpdesk@dgz.be](mailto:helpdesk@dgz.be)

